



EXPORTEO

Your international Partner

Présentation Autotests Covid





Qui sommes nous ?

Nous sommes une société d'import-export et de gestion de chaîne d'approvisionnement dédiée à l'international. Notre cœur de métier est la liaison et la mise en relation entre distributeurs, grossistes, chaînes de magasin et collectivités ainsi que la vente de produits et services à ceux-ci.

Forts d'une expérience de 40 ans dans le domaine du commerce international, nous maîtrisons parfaitement les problématiques d'approvisionnement tant sur le domaine financier et contractuel que sur le domaine logistique. En effet, notre plus grande force est de proposer à nos clients une solution simple et clés en mains pour accéder à des produits venant de l'autre bout du monde.

Depuis le début de la pandémie de COVID19, nous avons su rapidement établir un réseau de distribution pour offrir à tous nos clients de toutes tailles la possibilité de se fournir en fournitures médicales et paramédicales.

Parmi nos références client, nous travaillons avec le Groupement des Mousquetaires (Intermarché), le Groupe Casino, Metro, Carrefour China, China National Petroleum Corporation, Greenland Holdings et nombreuses centrales d'achat en France et à l'étranger.





Autotests COVID

Nous distribuons les autotests antigéniques de la marque Wesail. Les autotests ont la particularité d'être par prélèvement nasal (par opposition au prélèvement nasopharyngé) c'est à dire peu profondément dans les narines au lieu d'aller au fond de la cavité nasale et de pouvoir être effectués soi-même par un particulier. Conformément aux dispositions légales, nos autotests sont agréés ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et figurent sur la plateforme du Ministère de la Santé.

ansm
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé



**MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

HAS

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Mode d'emploi



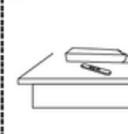
WESAIL

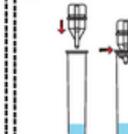
Notice

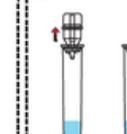
Autotest COVID-19
Pour prélèvement nasal

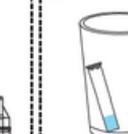
- 

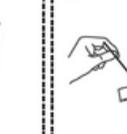
Commencez par vous moucher et par retirer toute substance de votre nez.
- 

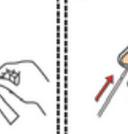
Puis utilisez un désinfectant pour les mains et laissez-les sécher entièrement.
- 

Ouvrez le sachet de test rapide et posez-le sur une table devant vous.
- 

Percez la membrane d'étanchéité du tube contenant le produit de lyse avec la pointe du capuchon de la buse.
- 

Retirez à nouveau le capuchon de la buse et posez-le avec le couvercle de protection vers le bas sur le plan de travail.
- 

Nous vous conseillons de mettre le tube avec le produit de lyse dans un récipient pour ne pas qu'il se renverse.
- 

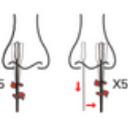
Ouvrez le sachet et sortez l'écouvillon sans toucher la pointe de l'écouvillon.
- 

Introduisez doucement l'écouvillon dans une narine sur environ 2-3 cm.

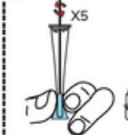
WESAIL

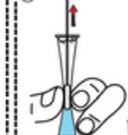
Notice

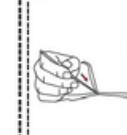
Autotest COVID-19
Pour prélèvement nasal

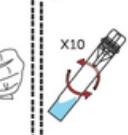
- 

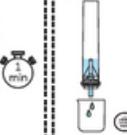
Raclez lentement la cloison 5 fois. Répétez la procédure dans l'autre narine avec le même écouvillon afin de garantir un prélèvement suffisant des deux fosses nasales.
- 

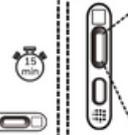
Retirez lentement l'écouvillon de la narine. Il est conseillé de retenir sa respiration pendant le prélèvement nasal antérieur.
- 

Introduisez l'écouvillon dans le tube du tampon de lyse. Pressez le tube et remuez l'écouvillon 5 fois.
- 

Pressez toujours le tube et retirez l'écouvillon. Veillez à bien enlever tout le liquide de l'écouvillon.
- 

Remettez l'écouvillon usagé dans le sachet d'emballage.
- 

Mettez le capuchon de la buse avec le couvercle de protection vers le haut. Mélangez le tube en le secouant légèrement 10 fois. Laissez-le à la verticale pendant 1 minute.
- 

Jetez les deux premières gouttes du prélèvement transformé. Versez à la verticale trois gouttes du prélèvement transformé dans la cavité à échantillon et laissez reposer pendant 15 minutes.
- 

Lisez le résultat du test aussitôt car celui-ci n'est valide que pendant 30 minutes.

Caractéristiques techniques

- Type de protéines détectées : N
- Méthode du test : Or colloïdal
- Sensibilité clinique vérifiée par TÜV 0123 : 96,30 % (naso-pharyngé)
- Spécificité clinique vérifiée par TÜV 0123 : 99,70 % (naso-pharyngé)
- Sensibilité clinique vérifiée par TÜV 0123 : 82,40 % (nasal)
- Spécificité clinique vérifiée par TÜV 0123 : 99,70 % (nasal)
- Délais d'obtention des résultats : 15 – 20 minutes
- Durée de conservation : 18 mois
- Température de stockage : Entre 2°C et 30 °C
- Langue du packaging & notice : Français
- Certificat CE par l'organisme notifié TÜV SUD en cours d'obtention
- Dérogation CE accordée par l'ANSM



0123



Formats

Boîte de 5 autotests



Boîte de 1 autotest



Contenu

- Dispositif de test
- Écouvillon stérilisé
- Tube d'extraction
- Insert de l'emballage
- Embout
- Tampon d'extraction de l'échantillon
- Notice



Informations réglementaires



Destination : Autotest antigénique rapide sur prélèvement nasal conçu pour aider le dépistage des infections par le SARS-CoV-2 chez les personnes asymptomatiques et non contact à risque de plus de 15 ans dans le cadre d'une utilisation restreinte à la sphère privée.

Visé à déterminer une infection en cours par le virus responsable de la COVID-19.

Bon usage : Ce test est à utiliser uniquement chez les adultes ou sous la supervision d'un adulte chez les jeunes de plus de 15 ans asymptomatiques et non contact à risque.

La précision du test dépend de la qualité du prélèvement de l'échantillon :

- Des résultats faussement négatifs peuvent résulter d'un mauvais prélèvement.
- Des résultats faussement positifs ou négatifs peuvent résulter d'une mauvaise utilisation (respect des conditions d'utilisation, température de conservation du test, durée de révélation).

Compte tenu d'une sensibilité plus limitée liée au mode de prélèvement, une utilisation itérative est recommandée pour les autotests, une à deux fois par semaine par exemple ; Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé, faisant l'objet, soit d'un marquage CE soit d'une dérogation de l'ANSM permettant sa mise sur le marché dans l'attente du marquage CE.

*La liste des tests validés est consultable sur le site :
<https://covid-19.sante.gouv.fr/tests>*

*En savoir plus sur les autotests :
<https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19>*



EXPORTEO

Your international Partner



70, avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers



01 84 80 70 84



autotest@exporteo.fr

